

泡立ちが
よい

リントが
出にくい

あらゆる
部位に対応



ブラシに代わる洗浄サポート製品

手指洗浄用特殊不織布 **ラヴァーレ**

再生コスト
カット

手荒れ対策

ディスポ
タイプ



クリーン包装

※未滅菌

ブラシに代わる洗浄サポート製品

ブラシによる手洗いでは、手荒れの問題がスタッフを悩ませています。また、従来のプロトコルでは皮膚を傷付け、手から更に細菌が剥離する可能性をCDCも指摘しています。ラヴァーレはこれらの不具合を解消する、「洗浄サポート製品」です。

手に優しく、洗浄力にすぐれています

2層構造 あらゆる部位に対応

- 表と裏で風合の異なる2種類の不織布
洗浄部位に応じて洗浄面を選択できます。

風合の異なる2種類の
極細繊維が1枚の
ラヴァーレに

洗浄力 泡立ちがよい

- 疎水性のある極細ポリエステル繊維
濡らしても大きさ厚みが変わらず、薬液が湿潤しやすいので、高い洗浄力を発揮することができます。

脱落防止 リントが出にくい

- アクリル樹脂をスプレー
アクリル樹脂をスプレーし、リントの発生を防止しています。
同時に、不織布に柔軟性も与えています。

経費の大幅削減が可能です

洗浄サポート製品「ラヴァーレ」は、素材に不織布を採用しました。織度を最適化したため泡立ちが良く、やさしく洗い上げます。しかも、ブラシよりもランニングコストを抑えることができます。

コスト削減の効果


	再生	滅菌	保管	
ラヴァーレ 	不要 使用後は廃棄するので、 洗浄コスト不要。	不要 クリーンルームで製造・包装 しているので常に清潔。	通常保管 クリーン包装なので保管 場所を選びません。	大
ブラシ 	洗浄コスト 必要	滅菌コスト 必要	クリーン保管が 必要	小

ラヴァーレを使った手洗方法のご提案

8ステップ(合計 200秒=3分20秒)のしっかり&スピーディ洗浄


STEP 1 予備的手洗 肘から指先

洗浄剤をワンショット(5ml程度)付け肘関節まで素洗い。
よく泡立てて、指先から肘関節まで洗います。

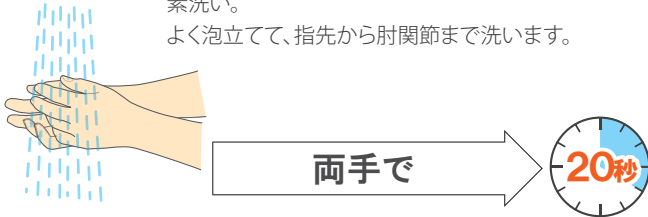

STEP 2 爪指肉洗い

手のひらにくぼみを作るようにラヴァーレのをせ、親指でくぼみをつまむようにして洗います。
この時爪と指肉の間を意識して開いたり閉じたりし、洗浄剤が十分に出入りするようにより反復させて洗います。

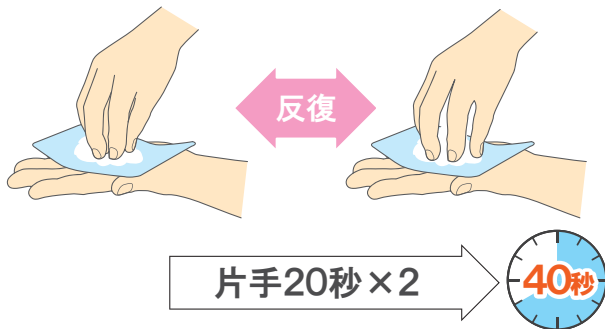

STEP 3 指を包みこむように


ラヴァーレで指を包み、ひねるようにして前後させます。
この時、爪と指肉の間に洗浄剤を浸透させるようにして洗います。
また、指の皺にも洗浄剤を浸透させるために、包んだ指を意識して回しながら抜き差しします。



STEP 4 手のひら

他方の手でラヴァーレをしっかり持ち、手の皺に洗浄剤が浸透するよう縦・横・斜めに小刻みに洗浄します。


また、最後にラヴァーレを挟み込んで合掌するように手を合わせ指の間に洗浄する。

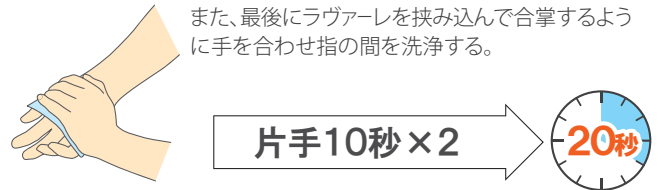

STEP 5 手の甲



STEP 6 手首から前腕1/2まで洗う

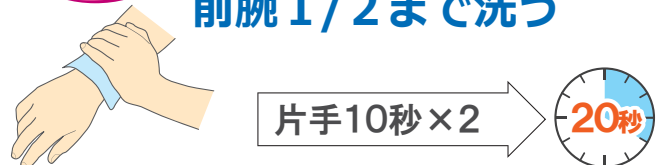

STEP 7 肘関節のところまで洗う



STEP 8 流水で全体を流す



通常の手指洗浄工程の後に...

エタノール含有の速乾性手指消毒薬を用いてラビング(擦式)法を実施し、除菌を行う衛生的(感染予防)手洗が一般化しております。

ラヴァーレを使用したシステム例



水道水対応手洗い装置と組み合わせて

ソルスパタオルホルダーとラヴァーレホルダーを組み合わせることで、従来どおりのオペレーションが可能になります。

ラヴァーレの応用例



●患者さまの手や足などの洗浄に

やさしく汚れをかき出すので、患者さまの負担も少なくなります。



●用手洗浄に

器具や器械類(鋼製小物など)の落ちにくい汚れを本体を傷めずに落とせます。



●リユース・スポンジの代わりに

シンクの洗浄などで、菌の温床となるリユース・スポンジの代わりに。

ラヴァーレ



クリーンなPP包装
(未滅菌)



クリーンに保つため
箱の内側にPP加工

品 番	LV-20	LV-06
材 質	ポリエステル繊維・アクリル樹脂	
1枚サイズ	95(W)×135(D)×6(t) mm	
入 数	30枚/箱	
出荷単位	20箱/ケース	6箱/ケース

ラヴァーレ ホルダー



品 番	LV-HS
サ イ ズ	102(W)×147(D)×105(H) mm
質 量	195 g
材 質	ステンレス

※ 商品は改良のため、予告なく仕様変更することがあります。ご了承ください。